

# Desinfektion

Die Geräte von ThermoSecure medical equipment GmbH

ThermoCare TC 40/45, ThermoCare MX 45/55, ThermoCare MX 75

ThermoBox TB 3, TB10, TB 30

TransCooler

werden wie folgt desinfiziert und gereinigt:

## 1) Hersteller & Produkt

### Desinfektionsmittel:

»Microbac forte 5 %« Firma Bode Chemie, Hamburg oder »Pursept-FD« Firma Merz-Hygiene.

Für diese Produkte bestehen in der vom Hersteller vorgeschriebenen Anwendung keine Bedenken einer Schädigung der verbauten Materialien. Das Tragen von Handschuhen bei der Anwendung wird empfohlen.

## 2) Zu desinfizierende Bauteile:

### Regelmäßig:

alle Oberflächen des Gehäuses, der Innenraum/Kühlraum, der Innendeckel.

Bei der Tastatur ist zu beachten, dass nur leicht feucht gewischt wird und keine Flüssigkeiten in das Gerät eindringen dürfen.

Grundsätzlich bei jeder Desinfektion das Gerät vom Strom trennen!

### Grundreinigung:

Die Befestigung des Lüftungsgitter im Innenraum wird mit 4 Schrauben gelöst, damit die Flächen hinter der Belüftung desinfiziert werden können. Hierbei ist dringend zu beachten das nur eingewiesenes technisches Personal diese Arbeit vornimmt! Die Verkabelung darf nicht beschädigt oder verdreht werden, da sonst die Funktion von Lüfter, Heizung oder Sensoren beeinträchtigt werden kann. Die Garantie erlischt bei Nichtbeachtung unverzüglich.

## 3) Anwendung

Grundsätzlich sind bei der Reinigung keine rauen oder scharfen Gegenstände/Hilfsmittel zu verwenden. Nur mit weichem Lappen arbeiten, oder besser nur sprühen. Insbesondere bei der Grundreinigung sehr vorsichtig vorgehen und auf die Unversehrtheit von Kabeln und Anschlüssen achten!

Nach Beendigung der Desinfektion dürfen keine »Pfützen« stehen bleiben. Reste sind aufzunehmen. Besonders bei der Grundreinigung ist dringend darauf zu achten dass elektrische Verbindungen nicht mehr feucht sind! Das gesamte Gerät muss sehr gut ablüften und restlos trocken sein, bevor es wieder in Betrieb genommen wird.